



Oxivir Excel Wipe

Lingettes détergentes et désinfectantes à large spectre pour le matériel médical non invasif et les surfaces non poreuses

Description

Les lingettes Oxivir Excel Wipe nettoient et désinfectent en une seule étape. Elles ont un large spectre avec un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d'Hydrogène Accéléré. Les lingettes Oxivir Excel Wipe s'utilisent sur le matériel médical non invasif et les surfaces dures, non poreuses.

Propriétés principales

- Virucidie complète en 30 secondes
- Revendications d'activité rapide pour un large spectre de virus, bactéries et levures
- Détergence optimale avec un système de tensioactifs haute performance
- Sans parfum
- Sans rinçage
- Plus sûr pour l'environnement et pour les utilisateurs : les actifs se décomposent en eau et en oxygène

Bénéfices

- Son efficacité à large spectre apporte les plus hauts niveaux de protection. Testé selon les normes européennes de désinfection contre de multiples pathogènes, avec une revendication virucide complète Poliovirus, Adenovirus, et Murine norovirus, efficace contre tous les virus enveloppés comme : HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus et Coronavirus.
- Un temps de contact court qui garantit l'efficacité désinfectante.
- Sûr pour les utilisateurs : pas besoin d'EPI. Aucune classification de danger.
- Performances de nettoyage supérieures et 10 fois plus rapide qu'un désinfectant traditionnel.
- Formulation AHP douce pour les surfaces pour étendre leur durée de vie. Pas de résidus.
- Convient pour une utilisation dans le commerce de détail, l'éducation, la santé et tout autre secteur d'activité (sauf zones de préparation et de transformation alimentaires).
- Simple et facile à utiliser éliminant tout risque d'erreur de dosage / dilution.
- Pas de risque de contamination croisée et un gain de temps non négligeable grâce au format lingettes jetables.

Mode d'emploi

1. Retirer les salissures en quantité importante.
2. Ouvrir le paquet de lingettes, prendre une seule lingette et le refermer.
3. Appliquer sur la surface, s'assurer que toute la surface est humidifiée, laisser sécher.
4. Changer la lingette quand elle n'humidifie plus la surface, est visiblement souillée ou en cas de changement de la surface à nettoyer.



© A.I.S.E.



Oxivir Excel Wipe

Données techniques

Aspect: Matériau constitutif des lingettes : 100% Polypropylène

Odeur: Neutre

pH de la solution imprégnée: <2.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production standard et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri des températures extrêmes. Réagit avec les substances oxydables.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau ou aux acides.

Selon les recommandations d'utilisation, Oxivir Excel Wipe convient à tous les matériaux traditionnellement rencontrés à l'exception notable des alliages de cuivre et de zinc : compatible avec l'acier inoxydable, le chrome, le vinyle, les tissus en nylon, les surfaces stratifiées, le verre, le caoutchouc, les plastiques durs et flexibles (polypropylène, polyuréthane, polyéthylène, PVC acrylique, fibre de verre et polycarbonate).

Données microbiologiques

Efficacité prouvée conformément aux normes: EN13727, EN16615, EN14476.

Pour de plus amples informations sur le spectre de désinfection, se référer au résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Produit biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditionnements disponibles

Diversey Oxivir Excel Wipe est disponible dans les différents conditionnements suivants :

Poches souples (12x100pc et 24x100pc.)

Boîte (6x160pc)

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

AHP® et Oxivir® sont des marques déposées de Diversey, Inc.