



Oxivir Excel® Foam CE

Détergent, désinfectant à large spectre pour le matériel médical non invasif et les surfaces dures non poreuses.

Description

Oxivir Excel Foam CE est une mousse détergente et désinfectante à large spectre, prête à l'emploi et efficace en un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d'Hydrogène Accéléré. Oxivir Excel Foam CE peut être utilisé pour le matériel médical non invasif et les surfaces dures non poreuses.

Propriétés principales

- Bactéricide, Virucide, Levuricide
- Désinfecte en 1 minute*
- Excellent pouvoir détergent
- Sans parfum
- Décomposable en eau et en oxygène
- Sans rinçage

Bénéfices

- Grande efficacité qui assure un degré de protection du patient très élevé. Testée selon les normes européennes et efficace contre les multiples souches pathogènes concernées. Revendication virucide complète sur Poliovirus, Adenovirus, le Norovirus Murin, et efficace sur tous les virus enveloppés comme : le VIH, le VHB, le VHC, l'Influenza, le virus de la Vaccine et Coronavirus.
- Un temps de contact court qui garantit l'efficacité désinfectante
- Plus sûr pour les utilisateurs, les patients et les visiteurs, aucun danger signalé, sans irritant respiratoire
- La formulation AHP est douce pour les surfaces et protège les matériaux plus longtemps
- Convient à l'utilisation dans les zones à hauts risques infectieux

Mode d'emploi


Mousse détergente et désinfectante:

1. Enlever les grosses salissures
2. Appliquer sur les surfaces en pulvérisant sur la microfibre
3. Laisser agir pour le temps de contact * et laisser sécher

Méthode des lingettes pré-imprégnées:

1. Préparer les lingettes Dry Wipes Disposable Wiping System suivant les instructions
2. Retirer les grosses salissures
3. Prendre une seule lingette et appliquer sur la surface
4. Laisser agir durant le temps de contact * et laisser sécher
5. Changer de lingette quand elle est souillée ou quand vous changez de surface à nettoyer

**Se référer au résumé d'activité désinfectante disponible sur demande.*

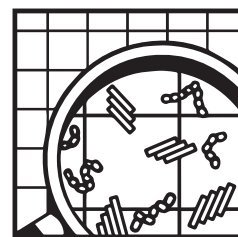

° A.I.S.E.



Oxivir Excel® Foam CE

Données techniques

Aspect: Liquide limpide incolore

Odour: Neutral

Valeur pH (en solution): 1.95

Densité relative (20°C): 1.000

Point éclair (°C): N/A

Durée de conservation: 720 jours

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri des températures extrêmes. Réagit avec les substances oxydables.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau ou à l'acide. Selon les recommandations d'utilisation, Oxivir Excel Foam convient à tous les matériaux traditionnels rencontrés à l'exception notable des alliages de cuivre et de zinc - se référer à notre table de compatibilité pour plus de précision.

Données microbiologiques

Efficacité prouvée selon les normes : EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

La mousse Oxivir Excel Foam est disponible en 6x750ml.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.