



Diversey™

Oxivir Excel Foam

Rengørings- og desinfektionsmiddel til ikke-invasive medicinske emner og ikke-porøse overflader

Beskrivelse

Diversey Oxivir Excel Foam er en kombination af et rengørings- og desinfektionsmiddel, der udnytter AHP-teknologien (accelereret hydrogenperoxid). Diversey Oxivir Excel Foam giver dig det bedste alternativ til en traditionel desinficering, idet den yder total virucidal virkning på kun 30 sekunder. Produktet er skånsomt over for overflader og samtidig uden risiko for dine ansatte, kunder, gæster, patienter eller besøgende. Den aktive ingrediens, hydrogenperoxid, nedbrydes på få minutter til vand og ilt.

Centrale egenskaber

- Fuld virucidal virkning på kun 30 sekunder.
- Hurtig virkning over for et bredt spektrum af vira, bakterier og gærsvampe.
- Fremragende rengøringsegenskaber på grund af det effektive overfladeaktive system.
- Duftfrit.
- Afskylning ikke påkrævet.

Fordele

- Den bredspektrede virkning yder et højt desinfektionsniveau.
- Vidtgående testet efter EU-normer (EN-test).
- Høj effekt over for et stort antal sygdomsfremkaldende stoffer.
- Fuld virucidal virkning over for såvel Polio, Adeno og Murine norovirus som kappebærende virus, fx HIV, HBV, HCV, Influenza, VACV og Coronavirus.
- Sikker for brugerne. Kræver ikke PPE. Ingen fareklassificering.
- Fremragende rengøringsegenskaber og betydelig hurtigere desinfektion end med de traditionelt anvendte midler.
- AHP-indholdet er mildt over for overfladerne, hvilket øger deres levetid
- Ingen rester på overfladen.
- Velegnet til brug i højrisiko-områder i butikker, undervisningslokaler, sundhedsvæsenet og i mange andre områder.
- Forbedrer efterlevelse af desinfektion med 35%

Brugsanvisning


Sprøjt-på-og-tør-af metode for rengøring og desinfektion:

1. Fjern synligt snavs.
2. a) Spray på en klud
b) Spray direkte på overfladen



CE 0044

AHP®

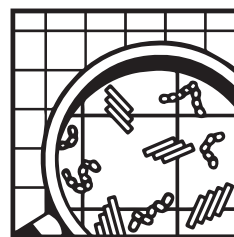

© A.I.S.E.

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



Oxivir Excel Foam

3. Indgnid overfladen med kluden, vær sikker på, at hele overfladen er fugtig. Lad overfladen tørre.
4. Sørg for, at overfladen forbliver fugtig i den krævede kontakttid.
5. Spray på kluden eller direkte på emnet når den ikke længere kan fugte overfladen
6. Skift kluden, når den er blevet snavset eller når der et nyt område skal rengøres.

Tekniske data

Udseende: Klar, farveløs væske

Duft: Neutral

pH-værdi (under brug): 1.95

Relativ vægtfylde ved (20 °C): 1,00 g/mL

Holdbarhed: 720 dage uåbnet. Garanteret 28 dages levetid efter åbning, såfremt emballagen genlukkes straks efter brug.

Ovenstående data er typiske ved en normal produktion, men må ikke opfattes som en specifikation.

Sikker håndtering og opbevaring

En fuldstændig vejledning om håndtering og opbevaring findes i et separat sikkerheds datablad – kan downloades på: sds.diverseym.com. Skal opbevares i originalemballagen i et område uden ekstreme temperaturer. Må kun benyttes af professionelle brugere eller specialister. Reagerer med oxiderbare stoffer.

Produktets forenlighed

Vigtigt: Bland ikke produktet med andre stoffer. Brug det ikke på vand- eller syrefølsomme overflader.

Under anbefalede brugsomstændigheder er Diversey Oxivir Excel Wipe velegnet til brug på de fleste normalt forekommende materialer som fx: Rustfrit stål, chrom, vinyl, nylonstoffer, laminerede overflader, glas, gummi, hårde og bløde plastgenstande (polypropylen, polyurethan, polyethylen, plexiglas, fiberglas og polycarbonat).

Mikrobiologiske testdata

Egenskaber testet efter forskellige europæiske standarder.

Test er foretaget under urene forhold.

Bakteriedræbende egenskaber/kontakttid

EN1276* / 1 minut

EN13727 / 30 sekunder

EN16615 / 1 minut

Gærsvampedræbende egenskaber

EN1650* / 5 minutter

EN13624 / 5 minutter

EN16615 / 1 minut

Virusdræbende egenskaber

EN14476 / 30 sekunder

(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)

* Test er udført på urene ikke-medicinske overflader

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer i produktet er bionedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Emballagestørrelser

Oxivir Excel Foam fås i kasser á: 6x750mL.

AHP®, Design og Oxivir® er registrerede varemærker hos Diversey, Inc.



Oxivir Excel Foam